



Bilden visar inte en faktisk patient.

# Snabbguide

till att ta **PRODUODOPA**<sup>®</sup>

## En översikt och checklista

**Produodopa**<sup>®</sup> (foslevodopa/foskarbidopa infusionsvätska, lösning) används för att behandla Parkinsons sjukdom i komplikationsfas.

Den här instruktionen finns tillgänglig som stöd för patienter som har fått Produodopa förskrivet av sin behandlande läkare. Läs alltid igenom bipacksedeln och bruksanvisningen innan du påbörjar din behandling. Du hittar dessa inuti produktförpackningarna för läkemedlet och tillbehören.

Prata alltid med din läkare om du har frågor om din behandling.

# Introduktion av ditt Produodopa-system

Dessa föremål är tillsammans med Vyafuser® infusionspump nödvändiga för att ta Produodopa. Notera att vissa av tillbehören kan se annorlunda ut än på bilderna.



## Vyafuser® infusionspump

Administrerar lösning från sprutan genom infusionsslangen och in i infusionsstället.



## Batterier och laddtillbehör

Används som strömkälla för att driva pumpen. Ett fulladdat batteri ska räcka i minst 24 timmar. Pumpen kommer med två batterier, ett för pumpen och ett som laddas tills du behöver det.



Adaptorn kan skilja sig från den som visas här.



## Läkemedelsflaska

Innehåller Produodopa-läkemedlet. Du kan förvara en kartong åt gången av läkemedlet vid rumstemperatur. Förvara resten av dina kartonger i kylan tills du behöver dem.



## Flaskadapter

Fästes på läkemedelsflaskan och används för att överföra läkemedlet från flaskan till sprutan.



## Spruta

Fylls med lösningen och används därefter i pumpen.



## Infusionsset

**Infusions slang:** Ansluter sprutan i pumpen till kanylen för att administrera läkemedlet.

**Införare och kanyl:** Används för att fästa kanylen i huden. Kanylen är en liten plastslang som tillåter läkemedlet att flöda in i kroppen.



## Bärmaterial

**Fodral:** För pumpen.

**Rem:** Med bekväm dyna för att bära runt halsen eller över axeln.

**Bälten:** Möjliggör anpassat bäralternativ runt midjan eller bröstet.



**Löstagbar flik:** Skyddar pumpknapparna.

Det är viktigt att bibehålla en steril miljö för att förebygga infektioner, ha därför alltid pappersservetter och spritkompresser nära till hands. Du behöver även en avfallsbehållare för att kunna kassera använda artiklar på ett säkert sätt.

# En checklista för hur du tar Produodopa


Ju mer du använder Produodopa-systemet, desto mer rutin kommer du att få kring din behandling.

## Här är en användbar checklista med viktiga steg:




1. Samla ihop alla tillbehör på underlägget och inspektera tillbehörens utgångsdatum och förpackningarna från eventuella skador.

Kontrollera lösningen så att den är fri från partiklar och inte grumlig. Lösningen ska vara rumstempererad vid användning.

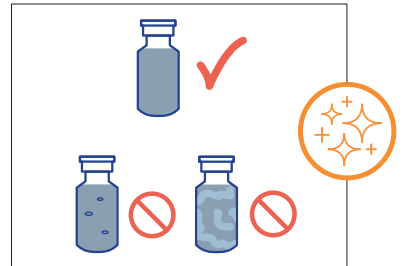


2. Avlägsna läkemedelsflaskans kork för att exponera gummiproppen. Torka av gummiproppen med en spritkompress och låt torka.

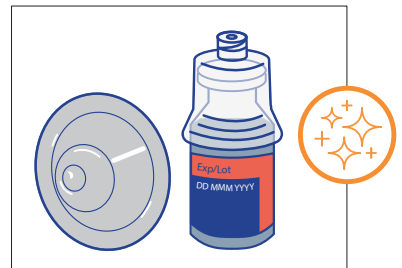




Det är viktigt att tillbehören hålls sterila. Tvätta händerna. Om byte av infusionsställe, rengör området innan du tar läkemedlet. Noggrann hygien bidrar med att förebygga hudproblem. Därför har vi skapat denna hjälpsymbol för att påminna dig.


3. Avlägsna luft från den nya sprutan genom att trycka in kolven.

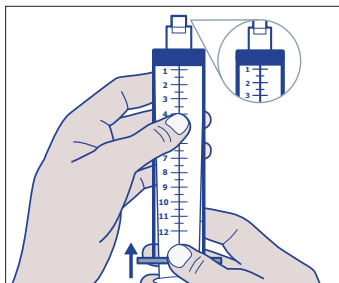

Skruva fast sprutan på flaskadaptern.

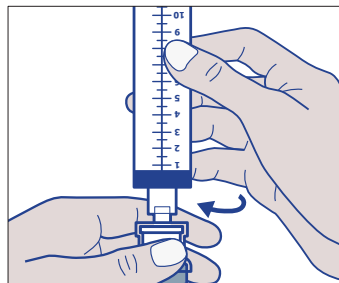


4. Dra in kolven och överför lösningen från flaskan till sprutan.

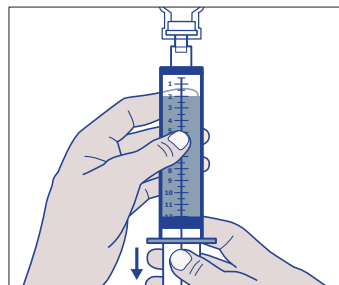


# En checklista för hur du tar Produodopa


5. Avlägsna eventuella stora bubblor genom att rotera sprutan.

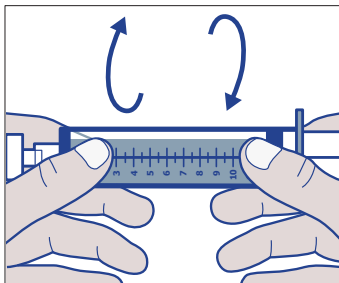


Tryck ut luften.

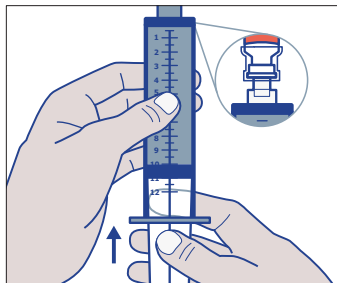

6. Koppla loss sprutan från flaskadaptorn.

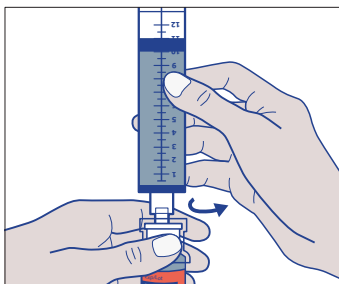


Anslut infusionsslangen.

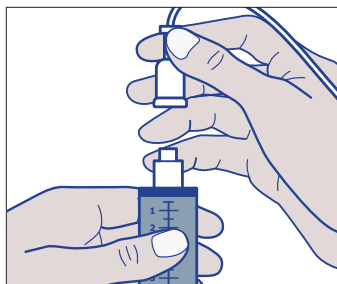

7. Se till att pumpen har ett fulladdat batteri. Starta pumpskärmen och placera sprutan inuti pumpen. Ladda alltid det använda batteriet så fort det tagits ur pumpen så att det är redo för senare.



8. Fyll infusionsslangen. När en droppe lösning uppkommer på pappersservetten har du tryckt ut all luft genom slangen.

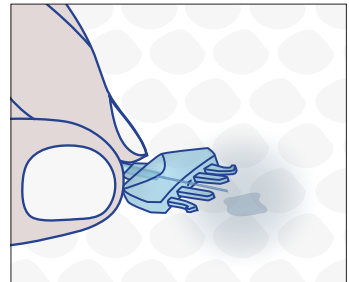


# En checklista för hur du tar Produodopa

9. Välj infusionsställe och rengör området. Använd rotationsschemat för att komma ihåg var du ska fästa kanylen.




10. Fäst kanylen på magen genom att trycka på knappen på införaren. Säkerställ att kanylen sitter ordentligt genom att trycka fast den självhäftande tejen på huden.

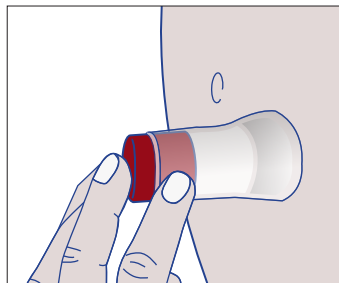




- **11.** Tryck in kopplingen, som sitter på infusionslagens ände, i kanylen och se till att det klickar på plats.

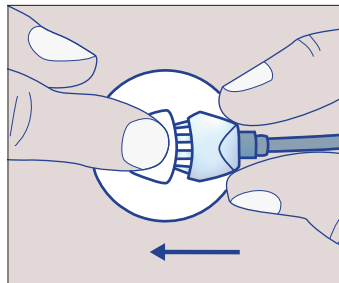

- **12.** Starta den kontinuerliga infusionen på pumpskärmen.

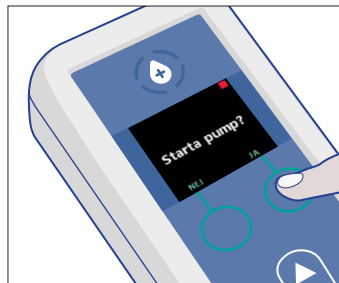

# Letar du efter ytterligare stöd?

## Organiseringsverktyg

Vid behandling med Produodopa finns ett underlägg samt en förvaringsväska som hjälper dig säkerställa att du har allt du behöver för att ta ditt läkemedel och hålla ordning på dina veckovisa tillbehör.

Kontakta Produodopa Support för att beställa tillbehören.

För stöd med din Produodopabehandling besök vår webbsida för patienter. Där kan du hitta instruktioner och filmer kopplat till din behandling samt tips och råd.

**[www.produodopapatient.se](http://www.produodopapatient.se)**

Öppna den inbyggda kamera-appen på din mobil eller surfplatta för att skanna QR-koden.





# Upprätthåll din behandling

För mer information om ditt Produodopa® system besök vår webbsida för patienter, [www.produodopapatient.se](http://www.produodopapatient.se). Där kan du hitta instruktioner och filmer kopplat till din behandling samt tips och råd.

[www.produodopapatient.se](http://www.produodopapatient.se)

Öppna den inbyggda kamera-appen på din mobil eller surfplatta för att skanna QR-koden.



## Referenser:

1. Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa infusionsvätska, lösning) bipacksedel, 30 nov 2023.
2. Bruksanvisning till VYAFUSER™ pump för patienter, aug 2023.

## Läs bipacksedeln innan du använder Produodopa

**Produodopa®** (foslevodopa + foskarbidopa), 240 mg/ml +12 mg/ml infusionsvätska, lösning. Produodopa används för att behandla Parkinsons sjukdom i komplikationsfas. Eftersom levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och blodtrycksfall, bör du vara försiktig vid bilkörning och användning av maskiner innan du vet hur din behandling påverkar dig. Om du känner dig mycket trött, avstå från bilkörning. Produodopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. För fullständig information, se [www.fass.se](http://www.fass.se). Bipacksedeln uppdaterades 30 nov 2023.